

Klara - Kompressions BH

ART.NO 31148

Klara ist ein robuster, nahtloser BH aus Doppelmaterial mit Kompression entsprechend Kompressionsklasse 2. Vorgesehen für den Einsatz nach verschiedenen Arten von Brustoperationen wie Brustverkleinerung, Mastektomie, Lumpektomie. Geeignet zur Behandlung von Lymphödemen der Brust. Weiches Material geeignet für strahlenbehandelte Hautzonen. Im Rückenbereich breit und vorne in der Mitte hoch. Vollständig zu öffnende Vorderseite für einfaches Anbringen mit Verschlussband. In mehreren Stufen zu öffnende und verstellbare Schultergurte.

- Kompression entsprechend der Kompressionsklasse 2.
- Vorn mittig zu öffnen mit Verschlussband, in drei Stufen verstellbar.
- Breite und verstellbare Schultergurte vorne mit Verschlussband, in mehreren Stufen einstellbar.
- Doppelt Material im Körbchen, Tasche für Wattierung/Prothese.
- Weicher, breiter, nahtloser Rand unter der Brust, ein behagliches Gefühl auch über eventuellem Wund-/Narbengewebe
- Extra hoher Schnitt unter der Achsel, im Rücken und der vorderen Mitte.

Anwendungsbereiche: Postoperativer BH mit Kompression entsprechend der Kompressionsklasse 2. Zur Verwendung nach verschiedenen Arten von Brustoperationen bestimmt. Lymphödem des Thorax.

Kontraindikationen: Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko.

Material: 83% polyamid, 11% elasthan, 6% polyester. Latexfrei.

Waschanleitung: Maschinenwäsche bei 60°C, für beste Haltbarkeit werden 40°C empfohlen. Verschlussband vor dem Waschen schließen. Sie können gerne einen Wäschesack verwenden. Kann bei niedriger Temperatur im Trockner getrocknet werden. Kein Bügeln. Wenn Blutflecken auftreten, in kaltem Wasser einweichen oder waschen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichmacher, da dies die Funktion des Materials beeinträchtigen kann.

Größentabelle:

	cm	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Körbchengröße	AA											
	A		S		M		L		XL		2XL	
	B											
	C											
	D											
	E											



Vollständig zu öffnende Front- und Schultergurte für einfaches Anlegen unmittelbar nach der Operation/ während des Heilungsprozesses.



Modell	Größe	Art.no
Klara Weiß	S	31148-09-40
Klara Weiß	M	31148-09-50
Klara Weiß	L	31148-09-60
Klara Weiß	XL	31148-09-70
Klara Weiß	2XL	31148-09-80