

# LyftPlus Stomi - Gürtel

ART.NO 50207

Stabiler Bauchgürtel mit vorgeformtem Bauchbereich für den etwas größeren Bauch. Die unelastische Vorderseite bietet effektiven Halt und Unterstützung. Der Stoff im Rücken ist elastisch. Verstellbare Passform mit Klettverschluss und einem Griff an der rechten Seite. Empfohlen unmittelbar nach der Operation oder als dauerhafter Gürtel für Hernien und/oder Stoma. Durch das robuste Material an der Vorderseite eignet sich LyftPlus Stomi auch besonders als Stomagürtel, da das Material sich leicht schneiden lässt, ohne auszufransen. Erhältlich in schwarz.

**Indikationen:** Mobilisierung nach der Operation. Stabilisierungsgürtel für Stoma-/Stomahernien. Vorbeugend gegen Hernien. Fixierung des Stomaverbandes.

**Kontraindikationen:** Inhaftierte Hernien.

**Material:** Polyamid 41%, Polyester 39%, Polyurethan 15%, Elastan 5%. Latexfrei.

**Waschanweisung:** Waschbar in der Maschine bei 40°C. Schließen Sie die Klettverschlüsse. Verwenden Sie einen Wäschesack. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Keine chemische Reinigung. Nicht bügeln oder im Trockner trocknen.

**Größe/Maße:** LyftPlus Stomi ist vorne 29 cm hoch und hinten 15 cm hoch. Um die richtige Größe zu finden, messen Sie den Hüftumfang in cm.

Größe	Hüftmaß in cm	Art.no	Höhe vorne	Höhe hinten
M	90-105	50207-00-50	29 cm	15 cm
L	100-115	50207-00-60		
XL	110-125	50207-00-70		
2XL	120-135	50207-00-80		
3XL	130-145	50207-00-90		
4XL	140-155	50207-00-91		

