

StomiMini - Stomagürtel

ART.NO 50213

Weiches Fixierband für die Befestigung von Stomabandagen. Das Fixierband sitzt direkt über dem Verband auf der Haut auf. Einfacher Verschluss mit frontalem Klettverschluss. Das Band besteht aus einem flexiblen, elastischen Material, das atmet und sich angenehm auf der Haut anfühlt. Die Größe ist einstellbar und kann durch den Klettverschluss über die gesamte Länge des Gürtels adjustiert werden. Der Druck des Fixierbands kann ebenso, je nach Bedarf, individuell eingestellt werden. Der Gürtel kommt in einer Universalgröße und passt für einen Umfang von bis zu 120 cm. Das Fixierband ist unauffällig und unter der Kleidung nicht sichtbar. Geeignet für die Stomaversorgung auf der rechten oder linken Seite. Erhältlich in Schwarz und Weiß mit einer Höhe von 7,5 cm. Das Fixierband darf nicht eingeschnitten werden.

Indikationen: Wird bei der Stomaversorgung zur Fixierung von Stomabandagen verwendet.

Kontraindikationen: Stomahernie.

Material: Polyamid 77%, Elasthan 13%, Baumwolle 10%. Latexfrei.

Waschanweisung: Maschinenwaschbar bei 60°C. Schließen Sie den Klettverschluss. Verwenden Sie einen Wäschesack. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Klarspüler. Keine chemische Reinigung. Nicht bügeln und im Trockner trocknen.

Größe/Maße: Messen Sie den Umfang der vorgesehenen Körperstelle. Die Universalgröße passt für Umfänge bis zu 120 cm.



Modell	Art.no	Höhe	Verpackg.
StomiMini, schwarz	50213-80-50	7,5 cm	3 stk
StomiMini, weiß	50213-89-50	7,5 cm	3 stk



50213-00-50



50213-09-50

