

# Balder - Hernienband/Leistenbruchgürtel

ART.NO 50215, 50216

Balder sind Hernienbänder, die speziell für den Einsatz bei kleinen bis mittelgroßen Leistenhernien entwickelt wurden. Flexible und diskrete Herniengürtel, die einer Verschlechterung eines Leistenbruchs vorbeugen. Balder stützt und stabilisiert den schwachen Teil der Bauchdecke, wo der Leistenbruch hervortritt. Die Leistenbruchbandagen lassen sich leicht anpassen und sind für doppelseitige und einseitige Leistenhernien erhältlich. In die Vordertasche(n) werden Polster aus festem Material eingelegt, die das Heraustreten der Hernie vollständig verhindern sollen. Für Balder Doppelseitig sind zwei lose Pads im Lieferumfang enthalten und für Balder Links und Rechts jeweils ein Pad. Zur individuellen Anpassung können die flachen Pads geformt und geschliffen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, ein speziell angefertigtes Kompressionspolster in die Tasche zu legen.

Balder Hernienbänder sind formschlüssig und für eine optimale Passform stufenlos in der Weite und auf gewünschte Position anpassbar. Mit Klettverschluss zu schließen. Weiche Schrittgurte, die einfach auf die richtige Länge gekürzt werden können, werden mit Klettverschluss am Bruchgürtel vorne jeweils auf Hüfthöhe befestigt. Die Taschen und die Innenseite der Hernienbänder bestehen aus einem angenehm weichen und atmungsaktivem.

**Indikationer:** Leistenbruch. Präoperativ oder postoperativ, bei konservativer Behandlung.

**Kontraindikationen:** Einklemmter Leistenbruch.

**Material:** 80% Polyamid, 14% Polyester, 6% Naturkautschuk.  
Pads: EVA Schaumstoff.

**Zubehör:** Konvexe Kompressionspelotten bitte separat bestellen:

- PadPlus, links Art.Nr. 50258-10-50
- PadPlus, rechts Art.Nr. 50258-20-50

**Waschanweisung:** Maschinenwaschbar bei 40°C. Schließen Sie den Klettverschluss. Verwenden Sie einen Wäschesack. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Klarspüler. Keine chemische Reinigung. Nicht bügeln oder im Trockner trocknen.

Größe	Hüftumfang in cm	Art.Nr. - Balder Doppelseitig	Art.Nr. - Balder Links	Art.Nr. - Balder Rechts
XS	70-85	50215-00-30	50216-10-30	50216-20-30
S	80-95	50215-00-40	50216-10-40	50216-20-40
M	90-105	50215-00-50	50216-10-50	50216-20-50
L	100-115	50215-00-60	50216-10-60	50216-20-60
XL	110-125	50215-00-70	50216-10-70	50216-20-70



50215-00: Balder Doppelseitig

Reg. design by OHIM: 001195515-0001



50216-20: Balder Rechts

Reg. design by OHIM: 002338954-0001



50258: PadPlus, extra Zubehör



**LATEX** Fadenumspinnen, kommt nicht mit der Haut in Berührung.

**MD** Class I **CE**