

AbdoCare - Gürtel

ART.NO 50225, 50226, 50237

AbdoCare ist ein elastisches Gürtel, das durch effektives Stützen und Kompression zur Schmerzlinderung beiträgt. Ermöglicht eine frühzeitige Mobilisierung nach der Operation. Der Gürtel lässt sich einfach einstellen und direkt nach der Operation anlegen. Die Größe / Kompressionsverhältnis / Form kann einfach angepasst werden, da der Klettverschluss auf der gesamten Oberfläche des Gürtels geschlossen werden kann. AbdoCare ist in drei verschiedenen Höhen und in variablen Größen erhältlich. Eine Größe kann als Universalgröße verwendet werden und vereinfacht so die Lagerhaltung. Das Band kann auch durch Abtrennen einer Höhenebene vermindert werden. Bei der Behandlung von Stomahernien ist es möglich, Löcher in AbdoCare zu schneiden, um das Stoma freizulegen. Farbe weiß.

Kompressionsgrad: Mittel, 2 von 3

Anwendungsbereiche: Postoperativer Hüftgürtel nach einer Bauch-/Rumpfoperation. Stabilisiert bei Hernien/Stoma. Vorbeugend gegen Hernie.

Kontraindikationen: Einklemmte Hernien. Infektion.

Material: Polyester 65 %, Nylon 19 %, Elasthan 16 %. Latexfrei.

Waschanleitung: Kann etwa 10 Mal bei 95°C gewaschen werden. Die Lebensdauer des Produktes verlängert sich allerdings bei Waschen-temperaturen von 40-60°C. Schließen Sie den Klettverschluss. Die Verwendung eines Wäschesacks wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht bügeln oder im Trockner trocknen.

Maße: Maß des Rumpfumfanges an der Stelle der gewünschten Platzierung.

Art.nr	Höhe	Größe 1 Umfang zentimeter	Größe 2 Umfang zentimeter	Größe 3 Umfang zentimeter	Größe 4 Umfang zentimeter	Größe 5 Umfang zentimeter
50225	23 cm	75 – 100	95-120	115-140	140-190	-
50226	30 cm	75 – 100	95-120	115-140	140-190	190-240
50237	37 cm	-	-	-	-	190-240



50225: 23 cm hoch



50226: 30 cm hoch



50237: 37 cm hoch

