

Vira x3, ViraKing - Gürtel

ART.NO 50227, 50229

Elastischer Gürtel, das den Rumpf effektiv stützt und komprimiert. Einfach anzulegen und mit zwei Zugbändern auf die gewünschte Passform und den gewünschten Kompressionsgrad einzustellen. Robustes Material, das seine Form behält, ohne auszuleiern. Glatt und weich auf der Haut ohne störende Nähte oder Kanten. Keine Schienen. Passt sowohl kurvigen als auch geraden Figurtypen. Höhe 25cm.

Kompressionsgrad: Stark, 3 av 3.

Anwendungsbereiche: Postoperativer Hüftgürtel nach einer Bauch-/Rumpfoperation. Stabilisiert bei Hernien/Stoma. Vorbeugend gegen Hernie.

Kontraindikationen: Einklemmte Hernien. Infektion.



Material: Polyester 88%, Elasthan 12%. Latexfrei

Waschanleitung: Maschinenwäsche 40°C (kann bei Bedarf bei höheren Temperaturen gewaschen werden, die Lebensdauer des Produkts ist jedoch länger bei einer niedrigeren Waschtemperatur). Die Verwendung eines Waschsäckchens wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht Trockner geeignet.

Messung: Wählen Sie die Größe anhand des Hüftumfangs aus, wenn der ermittelte Umfang innerhalb eines überlappenden Größenintervalls liegt, überprüfen Sie den Taillenumfang:

- Schmale Taille: Wählen Sie die kleinere Größe.
- Gerader Figurentyp: Wählen Sie die größere Größe.

Größe	1. Hüftmaße cm	2. Taillenumfang cm	Art.no Vira x3, Weiß	Art.no Vira x3, Schwarz	Art.no ViraKing, Schwarz
XS	70-90	60-80	50227-09-30	50227-00-30	-
S	80-100	70-90	50227-09-40	50227-00-40	-
M	90-110	80-100	50227-09-50	50227-00-50	-
L	100-120	90-110	50227-09-60	50227-00-60	-
XL	110-130	100-120	50227-09-70	50227-00-70	-
2-3XL	120-150	110-140	-	-	50229-00-80

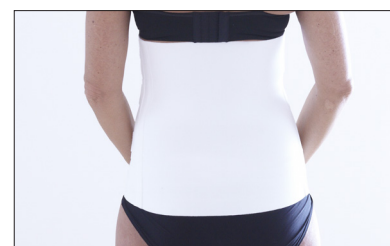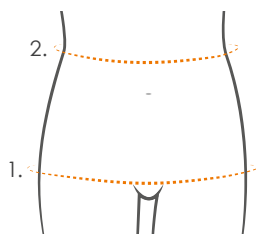

ViraKing - nur in schwarz, gröÙe 2-3XL.



STANDARD
100
1976-298
DTI

