

Courtney - Kompressionshose

ART.NO 51210

Wadenlange Kompressionshose aus nahtlos gestricktem Material. Empfohlen nach Operationen an Beinen, Gesäß oder Bauch wie Fettabsaugung und/oder Chirurgie. Die Hose hat beidseitig einen Hakenverschluss zum einfachen Aus- und Anziehen und Justieren der Passform. Der offene Schritt ermöglicht Toilettenbesuche, ohne das Kleidungsstück dabei ausziehen zu müssen. Bund mit Silikonrand, was ein Rutschen verhindert und den Tragekomfort erhöht. Breiter Keil an der Oberschenkelinnenseite für besten Komfort und Funktionalität. Gestricktes, flexibles Material in 4-Wege-Stretch, das sich dem Körper anpasst. Entlastet und komprimiert, ohne einzuschneiden oder unbequem zu werden. Gestrickte, figurbetonte Zonen im Knie-, Gesäß- und Leistenbereich sowie über dem Bauch verstärkt gestrickt.

Anwendungsbereiche: Kompressionskleidung nach plastischer Chirurgie. Entsprechende Kompressionsklasse 1.

Kontraindikationen: Infektion. Arterielle Durchblutungsstörungen. Hohes Thromboserisiko.

Material: 87% Polyamid, 13% Elasthan. Latexfrei.

Waschanleitung: Maschinenwäsche 40°C, kann bei Bedarf bei höheren Temperaturen gewaschen werden, max. 60°C. Die Lebensdauer des Produkts ist jedoch länger bei einer niedrigeren Waschtemperatur. Die Verwendung eines Waschsäckchens wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht Trockner geeignet.


Maße: Für eine bestmögliche Passform und den richtigen Kompressionsgrad ist es wichtig, dass das Kleidungsstück sorgfältig, gemäß den Angaben der Maßtabelle, angepasst wird. Das Kleidungsstück muss eng anliegen, darf sich aber nicht unangenehm oder einengend anfühlen.

Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle der Taille.


Hüfte: Stellen Sie sich mit geschlossenen Beinen auf eine gerade Unterlage und messen Sie den Umfang ihrer Hüfte über dem Schambein, an der breitesten Stelle Ihres Gesäßes/Hüfte.

Schenkel: Der Umfang wird in der Mitte des Oberschenkels gemessen.

Größe	Taillen- umfang cm	Hüft- maße cm	Oberschen- kelmaße cm	Art.no Schwarz
XS	62-68	86-91	46-50	51210-00-30
S	69-75	92-97	50-54	51210-00-40
M	76-83	98-103	54-58	51210-00-50
L	84-92	104-111	58-62	51210-00-60
XL	93-101	112-119	62-66	51210-00-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51210-00-80

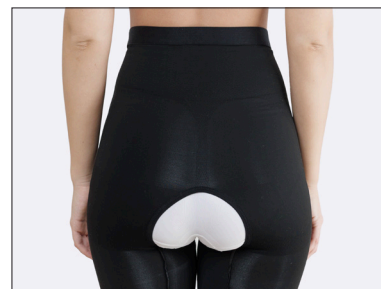

Hakenverschlüsse an beiden Seiten und Silikon im Bund.

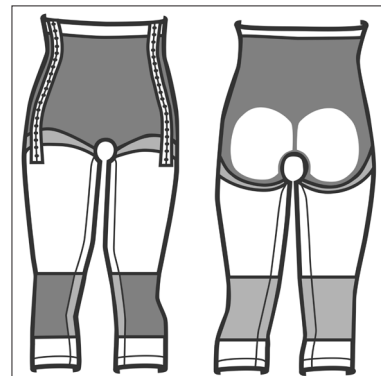

Compression class I



Seamless



4-way stretch



Adjustable with
hook & eye



STANDARD
100
6234-7001
DTI
www.oeko-tex.com

