

Duo axellås

Appliceringsinstruktion för
vårdgivare och patient

Ta av Duo



Ta av axellåset genom att öppna immobiliseringsband **A**, axelband **B** och tumband **C** fram. Axelbandet kan även göras längre och lyftas över huvudet istället för att öppnas.

Sätt på Duo



1 Placera den skadade armen i fickan så att armbågen vilar ända ut mot fickans bakre kant.



2 Trä axelbandet (om öppnat) genom D-ringen **D** och fäst vid lagom höjd **B**. Om bandet redan är fäst lyfts det istället över huvudet.



3 För immobiliseringsbandet runt midjan och fram.



4 Fäst immobiliseringsbandet på framsidan av armfickan **A**. Fäst tumbandet vid behov **C**.